



# Canaux radiculaires larges ou droits - 2 étapes – 2 limes rotatives

K-File #10

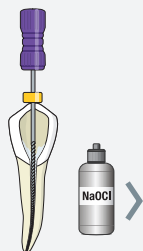

Revo-S+ SC2

25/.04

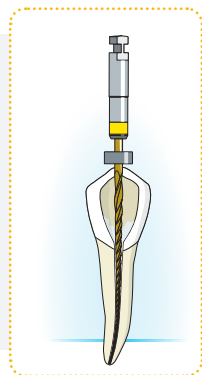

## Exploration du canal

Utilisez une lime K-File pour explorer le canal et déterminer s'il existe des restrictions.

## 1- Préparation du canal radiculaire


Façonnez le canal jusqu'à l'apex en retirant la dentine des parois.

**Mouvement 1:** 3 mouvements vers le bas

**Irrigation avec du NaOCl**

**Mouvement 2:** 1 mouvement centré vers le bas et 1 mouvement vers le haut avec soutien sélectif de la paroi, se terminant à la longueur de travail.


K-File #10

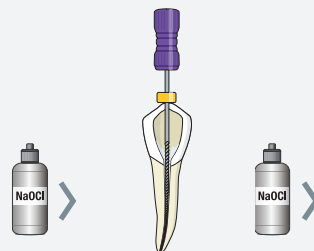

Confirmez la longueur de travail définitive.

Revo-S+ SU

25/.06

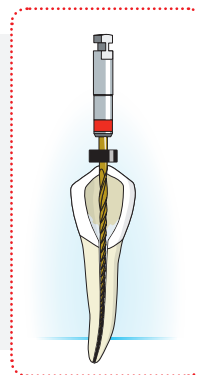

## 2- Conception définitive

Conception finale pour une conicité uniforme et une préparation optimale du canal

**Mouvement 1:** mouvements vers le bas

**Irrigation avec du NaOCl**


**Mouvement 2:** 1 mouvement centré vers le bas et 1 mouvement vers le haut avec soutien sélectif de la paroi, se terminant à la longueur de travail.



## Rinçage final et séchage

Utilisez 1 ou 2 points de papier (évités le dessèchement).

BioRoot™ Flow

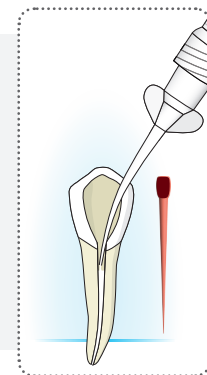

## 3- Obturation (technique du cône unique)

Appliquez BioRoot™ Flow dans le canal, placez la gutta-percha jusqu'à la longueur de travail, coupez et condensez.

## Réglages du moteur :

Rotation continue  
Vitesse pour SC2, SU :  
250–400 rpm  
Torque SC2, SU :  
1,8–2,5 N·cm

# Protocole étape par étape pour GenENDO



# Canaux radiculaires de taille moyenne - 3 étapes - 3 limes rotatives



**Revo-S+ SC1**  
25/.06

**Revo-S+ SC2**  
25/.04





**Revo-S+ SU**  
25/.06

**BioRoot™ Flow**

**K-File #10**

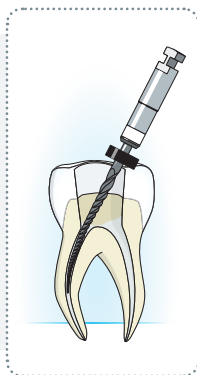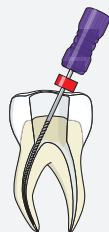

**K-File #10**

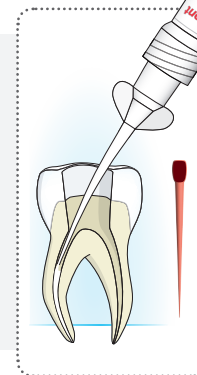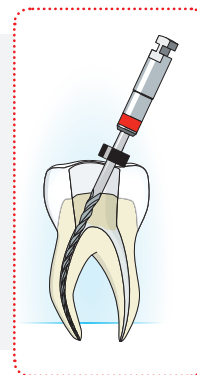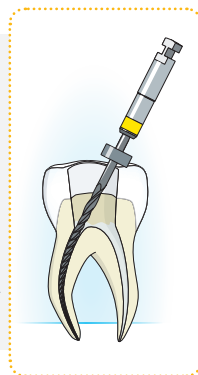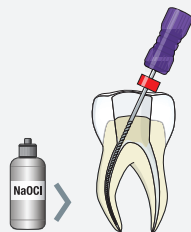

## Exploration du canal

Explorez le canal radiculaire afin de déterminer les restrictions ou les courbures.

## 1- Élargissement coronaire (si nécessaire)

Agrandissez le tiers coronaire afin d'éliminer les obstacles et de créer un accès droit.

## Détermination de la longueur de travail

Vérifiez si le canal est déjà dégagé, puis déterminez la longueur de travail.

## 2- Façonner le canal

Façonner le canal jusqu'à l'apex en retirant la dentine des parois.

## 3- Conception définitive

Conception finale pour une conicité uniforme et une préparation optimale du canal.

## Rinçage final et séchage

Utilisez 1 ou 2 points de papier (évités le dessèchement).

## 4- Obturation (technique du cône unique)

Appliquez BioRoot™ Flow dans le canal, placez la gutta-percha jusqu'à la longueur de travail, coupez et condensez.

Effectuez un mouvement vers le bas en direction du tiers coronaire du canal.

Si l'apex n'est pas accessible, cela peut indiquer un canal avec des restrictions.

**Mouvement 1:** 3 mouvements vers le bas

**Irrigation avec du NaOCl**

**Mouvement 2:** 1 mouvement centré vers le bas et 1 mouvement vers le haut avec soutien sélectif de la paroi, se terminant à la longueur de travail.

## Réglages du moteur :

Rotation continue  
Vitesse pour SC1, SC2, SU :  
250-400 rpm  
Torque SC1, SC2, SU :  
1,8-2,5 N-cm


# Protocole étape par étape pour GenENDO




# Canaux étroits ou présentant des contraintes - 4 étapes - 4 limes

Revo-S+ SC1  
25/06

K-File #10

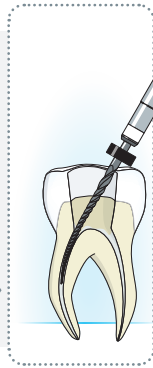


K-File #10

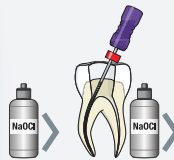


Glider  
16/03

K-File #10

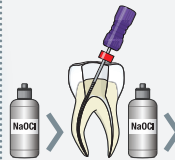


Revo-S+ SC2  
25/04

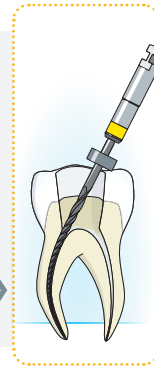


Revo-S+ SU  
25/06

Facultatif  
selon l'appréciation  
du dentiste en  
fonction de la taille  
du canal

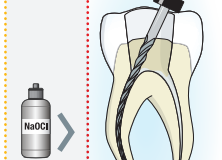

BioRoot™ Flow

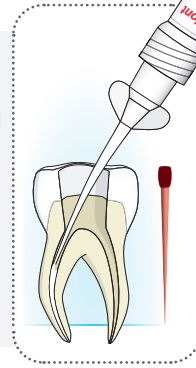

**Exploration du canal**  
Explorez le canal radiculaire afin de déterminer les restrictions ou les courbures.

**1- Élargissement coronaire (si nécessaire)**  
Agrandissez le tiers coronaire afin d'éliminer les obstacles et de créer un accès droit.

**Détermination de la longueur de travail**  
Vérifiez si le canal est déjà dégagé, puis déterminez la longueur de travail.

**2- Sécurité du canal radiculaire**  
Utilisez le Glider pour éliminer les contraintes (telles que les calcifications ou les courbures importantes) jusqu'à l'apex.

**Confirmez la longueur de travail définitive.**

**3- Façonner le canal**  
Façonner le canal jusqu'à l'apex en retirant la dentine des parois.

**4- Conception définitive**  
Conception finale pour une conicité uniforme et une préparation optimale du canal

**Rinçage final et séchage**  
Utilisez 1 ou 2 points de papier (évitiez le dessèchement).

**5- Obturation (technique du cône unique)**  
Appliquez BioRoot™ Flow dans le canal, placez la gutta-percha jusqu'à la longueur de travail, coupez et condensez.

Effectuez un mouvement vers le bas en direction du tiers coronaire du canal.

Effectuez un mouvement vers le bas jusqu'à la longueur de travail.

**Mouvement 1:** 3 mouvements vers le bas

**Irrigation avec du NaOCl**

**Mouvement 2:** 1 mouvement centré vers le bas et 1 mouvement vers le haut avec soutien sélectif de la paroi, se terminant à la longueur de travail.

**Réglages du moteur :**  
Rotation continue  
Vitesse pour SC1, SC2, SU, Glider :  
250-400 rpm  
Torque SC1, SC2, SU : 1,8-2,5 N-cm  
Torque Glider : 1,2 N-cm


Protocole étape par étape pour GenENDO




# Retraitement - 3 étapes - 3 limes rotatives

## Remove

30/.07

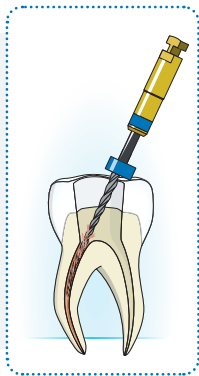


### K-File #10

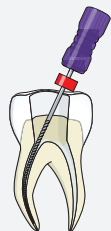


## Revo-S+ SC2

25/.04

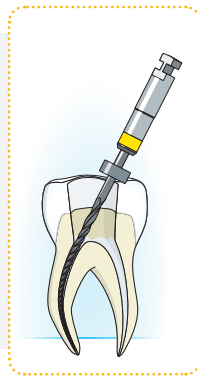


## Revo-S+ SU

25/.06

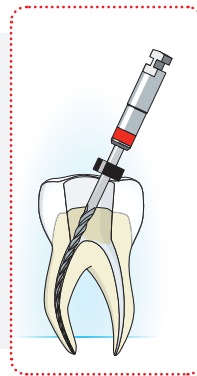

## BioRoot™ Flow

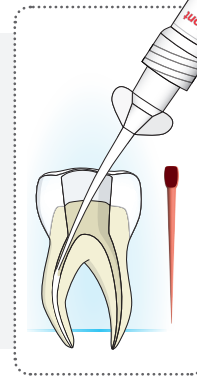

### 1- Débouchage du canal

Localisez l'entrée du canal et utilisez le Remove pour retirer complètement le matériau d'obturation existant (gutta-percha, ciment)..

### Nettoyage et mise en forme

Si l'obturation était complète, arrêtez-vous 3 mm avant la longueur de travail.

### Relocalisation de la perméabilité initiale à l'aide d'une lime K-File

Atteindre la longueur de travail complète

### 2- Façonnage du canal

Façonnez le canal jusqu'à l'apex en retirant la dentine des parois.

### 3- Conception définitive

Conception finale pour une conicité uniforme et une préparation optimale du canal

### Rinçage final et séchage

Utilisez 1 ou 2 points de papier (évités le dessèchement).

### 4- Obturation (technique du cône unique)

Appliquez BioRoot™ Flow dans le canal, placez la gutta-percha jusqu'à la longueur de travail, coupez et condensez.

Déplacez la lime d'avant en arrière dans le canal, sans exercer de pression apicale, afin d'éliminer la dentine de manière contrôlée et de minimiser le risque de perforation.

**Mouvement 1:** 3 mouvements vers le bas

#### Irrigation avec du NaOCl

**Mouvement 2:** 1 mouvement centré vers le bas et 1 mouvement vers le haut avec soutien sélectif de la paroi, se terminant à la longueur de travail.

#### Réglages du moteur :

Rotation continue  
Vitesse pour Remove : 400–800 rpm  
Torque maximal Remove : 2,5 N-cm  
Vitesse pour SC2, SU : 250–400 rpm  
Torque SC2–SU : 1,8–2,5 N-cm

## Septodont NV-SA Société Anonyme

87 Avenue de la Constitution - 1083 Bruxelles - Belgique - www.septodont.be

Lire attentivement les instructions d'utilisation figurant sur la notice et l'étiquetage avant toute utilisation.

